

Slangesystem

REF: 453100, REF: 453200, REF: 453300, REF:455100

Brugsanvisning


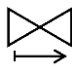






Tak, fordi du har valgt et tilbehørsprodukt fra vores virksomhed.

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, før du tilslutter slangesystemet og tilslutter det til *irrimed classic stoma* eller *irrimed classic rektal*.

Se altid i denne brugsanvisning, hvis du har spørgsmål om betjening eller fejlfinding på slangesystemet. Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte din forhandler, dit sygehus, stomiklinik eller andet fagpersonale. Din læge eller sygeplejerske, der er uddannet i stomiterapi, vil gerne rådgive dig.

Brug af slangesystemet skal afstemmes med dit sygehus, stomiklinik eller andet fagpersonale, som vejleder dig i brugen ved irrigation (tarmskylning) med *Irrimed*. Irrigation skal læres under kyndig vejledning af en fagperson.

Sikkerhedsanvisninger, symbolforklaring

	Mærkning i henhold til det europæiske direktiv om medicinsk udstyr 93/42/EØF med nummeret på det bemyndigede organ.		Envejsventil. Slangen har en returventil, der sikrer mod tilbagemøb.
	Advarsel		Fremstillingsdato
	Producent		Beskyt mod fugt
	Beskyt mod lys		Følg brugsanvisningen

Funktionsbeskrivelse og første opstart

Slangesystemet består af 2 komponenter, en slange (1,30 m) med integreret returventil og en konus af blødt gummi. Gennem slangen strømmer skylningsvæsken (klart drikkevand) fra irrigatoren *irrimed classic stoma* eller *irrimed classic rektal* ind i patientens tarm.

Opmærksomhed!




Brug ikke vand med tilsætningsstoffer eller medicin.

De to komponenter, overførselsslangen og konussen/rektalkatetret, er forbundet med en Luer-Lock-skrueforbindelse, der samles ved at dreje den 1/4 omgang højre om (med uret).

Rengøring

Efter brug skal konussen rengøres med varmt vand. For at gøre dette skal du løsne slangeforbindelsen ved at dreje den en ¼ omgang til venstre (mod uret). Dette gør det muligt at adskille konussen fra slangen, når den skal rengøres. Efter rengøring samles konussen og slangen igen. Vær opmærksom på gennemstrømningsretningen! **Konussen skal skrues på den sorte side af returventilen (se billedet på bagsiden).**

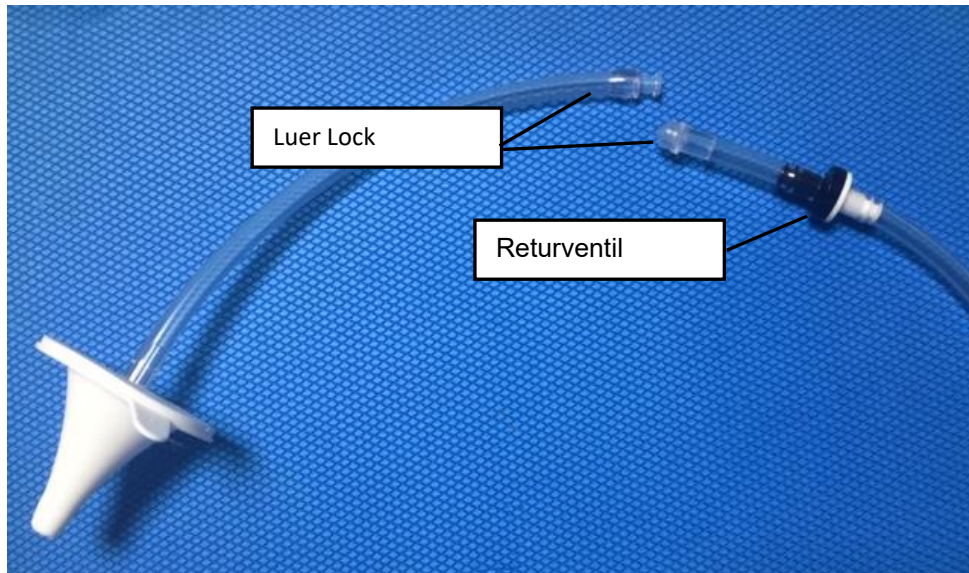

Pleje og vedligeholdelse

Slangesystemet er en forbrugsvare og vil ændre udseende efter længere tids brug på grund af biofilm. Der er ikke tale om skadelige bakterier, men om normale bakterier, der findes i alt drikkevand. Denne effekt ses normalt først i overføringsslangen, der hvor den skrues på pumpen. **Af hygiejniske årsager bør slangesystemet derfor udskiftes hver måned**, dog senest når biofilmen begynder at brede sig op i slangen.

Slangesystemet er kun beregnet til brug af **én patient**.

Vigtig bemærkning!

Reservedele kan bestilles hos din leverandør ud fra dine bevillinger.

Tilbehør		Bestil.-nr:	Til irrimed
Slange 1,30 m lang med returventil og Luer Lock-tilslutning i begge ender		455003	455000
Slangesystem bestående af slange (1,30 m) med returventil og irrigationskonus rektal		455100	455000
Slangesystem bestående af slange (1,30 m) med returventil, konus størrelse 1 til Combifix-skylleærme lille stomi		453100	454000
Slangesystem bestående af slange (1,30 m) med returventil, konus størrelse 2 til Combifix-skylleærme normale og store stomier		453200	454000
Slangesystem bestående af slange (1,30 m) med returventil, konus til stomi - ikke egnet til Combifix- skylleærmer		453300	454000
1 pakke (30 stk.) Combifix skylleærme		453000	454000